

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/bruksizm-szyna-relaksacyjna-pudelko-ochronne-p-490.html>



Bruksizm szyna relaksacyjna + pudełko ochronne

Cena brutto	24,50 zł
Cena netto	22,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Skandia denta

Opis produktu

SZYNA NAGRYZOWA NA BRUKSIZM + PUDEŁKO

Bruksizm to szkodliwy nawyk zaciskania lub zgrzytania zębami zwłaszcza podczas snu. Jego główną przyczyną jest stres i napięcie mięśniowe. Po pewnym czasie może doprowadzić do poważnego uszkodzenia zębów włączając w to :

- zauważalne zużycie i uszkodzenie zębów,
- bolesność stawu skroniowo-żuchwowego i mięśni,
- wrażliwość i ból zębów

Sposób przygotowania szyny:

Zagotowaną wodę należy wlać do szklanego pojemnika. Kiedy woda schłodzi się do ok. 70 stopni Celsjusza szynę należy włożyć do pojemnika na 20-30 sekund. Kiedy ściany pionowe szyny lekko odchyła się do poziomu szynę należy założyć na szczękę przygryzając ją. Po okresie 1-2 minut należy wyciągnąć ją z ust i włożyć na 2-3 minuty do zimnej wody. Szyna jest gotowa do użycia. Jeżeli szyna jest za duża można ją dociąć nożyczkami.

Szynę należy dokładnie wyczyścić szczoteczką i pastą do zębów przed i po każdym użyciu.

UWAGA !!!

Lepiej powtórzyć modelowanie 2-3 razy w zimniejszej wodzie (60-70st.) niż roztopić szynę w zbyt gorącej wodzie (80-90st.)

Dostępne kolory (matowe): zielony, czerwony, biały, fioletowy, żółty, różowy, jasno niebieski