

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/fittydent-super-mocny-klej-do-protez-40g-p-839.html>



Fittydent super mocny klej do protez 40g

Cena brutto	18,50 zł
Cena netto	17,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Fittydent

Opis produktu

Kleje Fittydent są przeznaczone do mocowania zarówno protez górnych (protezy szczękowe), jak i dolnych (protezy żuchwowe).

W przeciwieństwie do większości dostępnych na rynku preparatów protetycznych, klej Fittydent Super nie zawiera w swoim składzie cynku, który (jak podają opublikowane w 2008 roku badania) przyjmowany w nadmiarze z preparatami protetycznymi może prowadzić do zaburzeń neurologicznych.

Sposób użycia kleju do mocowania protez zębowych Fittydent Super:

1. Zanim zastosujesz klej do protez Fittydent dokładnie umyj i osusz swoje protezy zębowe. Klej fittydent zadziała w stu procentach tylko jeśli zostanie nałożony na całkowicie osuszone protezy.
2. Powoli wyciskając klej z tubki nałóż go na protezy. Aby klej łatwo wydostał się z tubki, ogrzej ją w dłoniach.
3. Nałóż klej na protezy pasmami, upewniając się, że nie znajdzie się on zbyt blisko ich zewnętrznych krawędzi.
4. Natychmiast po użyciu zakręć dokładnie tubkę zapobiegając jej zatykaniu.
5. Włóż protezę do ust i mocno przygrzyź.
6. W celu uzyskania najlepszego rezultatu, odczekaj 15 minut zanim zaczniesz jeść lub pić.

Pomocne wskazówki:

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie ściągnąć folię zabezpieczającą otwór tubki.

Możliwe, że na początku trzeba będzie kilkakrotnie sprawdzić jaka ilość kleju do protez jest wystarczająca, aby proteza pozostała na swoim miejscu przez cały dzień. Jeżeli będzie to konieczne, należy zwiększyć ilość nakładanego kleju.

Jeżeli pod koniec dnia klej do protez nadal mocno trzyma protezę, to nie należy zdejmować jej na noc na siłę. Następnego dnia należy nałożyć mniejszą ilość kleju Fittydent.

U osób posiadających wrażliwe dziąsła, może sporadycznie występować ich łagodne podrażnienie - w postaci mrowienia lub pieczenia.

W celu skutecznego oczyszczenia swoich protez używaj tabletek do czyszczenia Fittydent!

Aby upewnić się, że protezy są dobrze dopasowane, należy regularnie odwiedzać swojego stomatologa.

Skład kleju do protez Fittydent Super:

Sodium Carboxymethylcellulose, Polyvinylacetate, Alcohol Denat., Petrolatum, Hydroxypropylcellulose.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.