

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/orthoplus-ef-classe-ii-large-elastyczny-aparat-ortodontyczny-p-75.html>



orthoplus EF Classe II Large - elastyczny aparat ortodontyczny

Cena brutto	245,00 zł
Cena netto	226,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	orthoplus

Opis produktu

Aparat EF Classe II Large jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 11 do 15 lat, dlatego wyposażono go w większe łuki. Ten aparat najlepiej sprawdza się w korekcji głębokiego zgryzu przy wadach klasy II.



EF Classe II Large (dawniej EF1)

Budowa

- Zderzaki wargowe, kształtem przypominające łyż, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.
- Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe szeregowanie zębów. Aparaty wyposażono w dodatkowe wcięcia sprzyjające wczesnemu szeregowaniu zębów.
- Zapora językowa wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna wpływa korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
- Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki czemu odciążają kłykcie i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.



Trening czynnościowy

- Zapora językowa działa na proprioceptywne układanie języka i kieruje go w stronę podniebienia – działa jako element wymuszający prawidłowe odruchy oraz jako automatyczny punkt orientacyjny do układania języka.
- Ostony aparatu zapobiegają przykurcowi mięśniowemu w strefie bruzdy wargowo-bródkowej. Udowodniono, że zderzaki wargowe pomagają w wydłużeniu łuku w przypadku słabego lub średniego stłoczenia zębów. Taka korekcja jest pomocna w dalszym leczeniu.
- Aparat działa jak mięsień pociągający w przód o optymalnej wydajności. Płat płaszczyny zgryzowej w sferze trzonowej uwalnia kłykie w miarę obniżania dolnej szczęki i wysuwania jej do przodu. To działanie stanowi klucz do zaobserwowanych bardzo dobrych wyników leczenia. Można je wykorzystać do leczenia wad klasy III z przesunięciem, aby osiągnąć efekt nastawienia żuchwowego bez wywoływania nacisku.

Pacjent powinien nosić aparat minimum 2 godziny dziennie i bezwzględnie nocą podczas snu – jest to niezbędne dla działania proprioceptywnego. Podczas snu, poprzez biologiczne sprzężenie zwrotne dodatkowo, pacjent ćwiczy oddychanie, poprawne układanie języka i pracę warg.

Pacjentka leczona za pomocą EF Classe II Large

Blandine – wiek: 12 lat – **początek leczenia:** nagryz poziomy + wąski łuk



Po 3 miesiącach stosowania EF Classe II Large, następnie 20 tygodniach w EF Braces z Quad Helix



Efekt: po leczeniu aparatem stałym wraz z aparatem EF Braces

Aparat dostępny jest w jednym rozmiarze.

Dostępny w 5 kolorach



D590 000R



D590 000B



D590 000V



D590 000



D590 002

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR APARATU: niebieski , zielony , czerwony , żółty , bezbarwny