

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/ark-squeezer-tip-koncowka-do-cwiczen-warg-i-szczeki-p-1844.html>



ARK Squeezer Tip końcówka do ćwiczeń warg i szczęki

Cena brutto	35,50 zł
Cena netto	32,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	ARK Therapeutic

Opis produktu

Wynaleziony przez Angeliki Xygka, BSc / MSc, SLP i opracowany przez ARK, proSqueezer to ustne narzędzie motoryczne zaprojektowane specjalnie w celu doskonalenia umiejętności gryzienia i zamykania ust. Kształt V zapewnia opór podczas ściskania - idealny do ćwiczeń szczęki i ust.

Kończówka ProSqueezer do wybratorów z-Vibe oraz REREK jest dostępna pojedynczo w dwóch poziomach trudności: żółtym (łatwiejszy) i pomarańczowym (trudniejszy). Zacznij od żółtego proSqueezera i ostatecznie przejdź do pomarańczowego zapewniającego wyższy poziom trudności.

Angeliki jest terapeutką mowy i języka, terapeutką miodfunkcjonalną i terapeutką SI z siedzibą w Atenach w Grecji z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizującą się w Apraksji, opóźnieniu mowy i języka, jąkaniiu, terapii karmienia i terapii wypychania języka.

Doskonały dodatek do każdego zestawu narzędzi motorycznych!

- Wyprodukowano w USA, klasa medyczna, zgodność z FDA
- Nie zawiera BPA, PVC, ołowiu, ftalanów ani lateksu
- Wymiary: około 19cm długości i 3,3cm w najszerszej części
- Można myć w zmywarce (bez cyklu suszenia)

Uwaga:

- Narzędzi terapeutycznych powinno używać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zaleca się stosowanie bez włączonej vibracji, wykorzystaj wibrator jako rękojeść do końcówki.

ĆWICZENIA NA UMIEJĘTNOŚĆ ZRYZIENIA:

A) Umieść proSqueezer w ustach i poproś osobę, aby ugryzła 5 razy przednimi zębami.

*Następnie należy ugryźć i przytrzymać maksymalnie przez 5 sekund.

B) Umieść proSqueezer pomiędzy zębami przedtrzonowymi z jednej strony.

*Poproś osobę, aby ugryzła 5 razy. Następnie należy ugryźć i przytrzymać maksymalnie przez 5 sekund.

*Powtórz po drugiej stronie ust.

ĆWICZENIE ZAMYKANIA WARG:

A) Umieść proSqueezer między ustami i poproś osobę, aby zacisnęła usta 5 razy (używając tylko ust, bez zębów).

*Następnie poproś o ściśnięcie i przytrzymanie ust pozycji zamkniętej maksymalnie przez 5 sekund.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

TWARDOŚĆ: Fuksja - Łatwa , Żółta - Średnia , Pomarańczowa - Trudna