

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/chemaortho-i-zestaw-ortodontyczny-ruchome-aparaty-ortodontyczne-nakladki-ortodontyczne-p-1906.html>



Chemaortho I zestaw ortodontyczny - ruchome aparaty ortodontyczne, nakładki ortodontyczne

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	36,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Chema

Opis produktu

CHEMAORTHO I to zestaw produktów przeznaczonych do codziennej higieny jamy ustnej dla osób noszących ruchome aparaty ortodontyczne oraz nakładki ortodontyczne.

W skład zestawu wchodzi :

ORTHOCLEAN Koncentrat stosowany jako preparat do czyszczenia ruchomych aparatów ortodontycznych.



Odpowiednio dobrana formuła zapewnia bezpieczną i efektywną pielęgnację ruchomych aparatów ortodontycznych. Skutecznie usuwa nagromadzoną warstwę osadów i przebarwienia.

Płyn może być używany codziennie.

Sposób użycia:

- 10-20 ml płynu wlać do ½ szklanki ciepłej wody,
- do płynu włożyć aparat, tak aby cały zanurzony był w płynie,
- pozostawić aparat w roztworze na 5-20 minut,
- wyjąć aparat z roztworu i opłukać pod bieżącą wodą.

ORTHOFLUOR Płukanka dla osób noszących aparat ortodontyczny stosowana w celu ochrony przed próchnicą.



- osób noszących aparaty ortodontyczne, ruchome jak i stałe
- osób z drutem retencyjnym po leczeniu ortodontycznym.

Zapewnia skuteczną ochronę przed próchnicą, na którą zęby podczas leczenia ortodontycznego są wyjątkowo narażone.

- Profilaktyka i odnowa zębów
- Zapobiega próchnicy
- Hamuje demineralizację szkliwa
- Obniża nadwrażliwość zębów na bodźce mechaniczne i termiczne
- Dociera do trudno dostępnych miejsc
- Zawiera 0,02 % (200 ppm) czynnego fluoru
- Aminofluorki zawarte w płynie wzmacniają szkliwo i chronią zęby przed próchnicą
- Do codziennego użytku

DENTOGEL Żel łagodzący podrażnienia stosowany przy stanach zapalnych dziąseł.



Żel do miejscowego stosowania w przypadku stanów zapalnych i bolących dziąseł, drobnych urazów spowodowanych np. aparatami ortodontycznymi.

- Stany zapalne dziąseł i choroby przyzębia
- Nadmierne tworzenie płytki nazębnej
- Regeneracja dziąseł oraz błony śluzowej jamy ustnej
- Urazy spowodowane aparatami ortodontycznymi

DentoGel dzięki odpowiednio dobranemu składowi i konsystencji zmniejsza dyskomfort, przyspiesza czas regeneracji uszkodzonych tkanek. Żel przylega do uszkodzonych tkanek i izoluje je od czynników zewnętrznych, chroniąc przed podrażnieniami i dalszymi uszkodzeniami np. aparatami ortodontycznymi.

Produkt jest przeznaczony do stosowania w terapii wspomagającej leczenie chorób przyzębia.

Składniki zawarte w żelu pielęgnują, chronią, pomagają utrzymać dziąsła i błonę śluzową jamy ustnej w dobrej kondycji.

Chlorheksydyna zawarta w produkcie skutecznie zwalcza płytkę nazębną przez co zapobiega chorobom dziąseł. Sodu hialuronian oraz alantoina wspomagają regenerację błony śluzowej.

DentoGel zapewnia przyjemne, miętowe odświeżenie.

Sposób użycia:

Niewielką ilość żelu nanieść na zmianę. Unikać dotykania językiem naniesionego produktu, aby mógł wytworzyć się film ochronny. Dla uzyskania lepszych efektów nie jeść i nie pić przez około 30 minut.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 6 lat.