

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/endogel-5-5-g-preparat-do-chemicznego-opracowania-kanalow-korzeniowych-p-1948.html>



Endogel 5,5 g preparat do chemicznego opracowania kanałów korzeniowych

Cena brutto	29,90 zł
Cena netto	27,69 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Chema

Opis produktu

Chema Endogel 5,5 g - preparat do chemicznego opracowania kanałów korzeniowych

Jest szczególnie pomocny podczas ponownego opracowywania niewłaściwie wypełnionych kanałów korzeniowych; ułatwia poszerzenie i opracowanie mechaniczne wąskich kanałów korzeniowych. Ma właściwości lubrykujące, ułatwiające wślizgnięcie się narzędzi do światła kanału korzeniowego, jest łatwy do zdeponowania w kanale, dobrze napływa do kanałów i dobrze utrzymuje się w kanale. Zmniejsza ryzyko złamania narzędzia wewnątrz kanału.

Wskazany:

- do odślania ujęć kanałowych,
- do chemicznego poszerzania i udrażniania kanałów korzeniowych,
- do usunięcia warstwy mazistej ze ściany kanału,
- do udrożnienia kanałów w przypadku obecności w nich zębiniaków.

1 g żelu zawiera 150 mg disodu edetynianu.

Opis działania

Wyrób zawiera disodu edetynian, który reaguje z mineralnymi składnikami tkanek twardych zęba (działanie chelatujące), czyniąc je podatnymi na mechaniczne opracowanie. Dodatkowo Endogel®, dzięki swojej konsystencji ma właściwości lubrykujące.

Zabarwienie wyrobu sprawia, że jest on lepiej widoczny w jamie zęba.

Sposób postępowania z wyrobem

1. Odkręcić koreczek ze strzykawki i zakręcić na jego miejsce wymienną jednorazową końcówkę (tępo zakończoną jednorazową igłą).
2. Za pomocą wymiennej końcówki umieścić niewielką ilość wyrobu na dnie komory zęba lub bezpośrednio na narzędzia kanałowe, po czym mechanicznie opracowywać kanał.
3. W trakcie mechanicznego opracowywania płukać kanały roztworami podchlorynu sodu (np. wyrób Chloran, Chloran Plus) lub EDTA (np. wyrób Endosal®, Endoxal®).
4. Po nałożeniu wyrobu zdjąć jednorazową końcówkę, a następnie cofnąć nieznacznie tłoczek, aby usunąć żel z końcówki strzykawki. Zamknąć strzykawkę koreczkiem.

Warunki przechowywania

Przechowywać w opakowaniach dokładnie zamkniętych.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Chronić przed światłem słonecznym.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi (Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).