

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/fittydent-denture-klejace-podkladki-do-protez-15-sztuk-p-840.html>



Fittydent Denture klejące podkładki do protez - 15 sztuk

Cena brutto	16,20 zł
Cena netto	15,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Fittydent

Opis produktu

Obustronnie klejące podściółki pod protezy żuchwowe Fittydent Super są nierozpuszczalne w wodzie i stanowią doskonałą propozycję dla osób posiadających wąską lub płytką żuchwę.

Sposób użycia podściółek do mocowania protez Fittydent Super:

1. Zanim użyjesz klejące podściółki do mocowania protez Fittydent dokładnie umyj i osusz swoją dolną protezę.
2. Przed zastosowaniem podściółki usuń z niej folię (z obu stron): zegnij podściółkę wzdłuż środkowej linii i odklej folię ochronną.
3. Nałóż podściółkę na protezę żuchwową i mocno dociśnij tak, jak zostało to zaprezentowane na rysunku - upewnij się, że wszystkie pęcherzyki powietrza zostały usunięte.
4. W razie konieczności przytnij podściółkę nożyczkami tak, aby pasowała do Twojej protezy.
5. Włóż protezę do ust i mocno przygryź. W celu uzyskania najlepszego rezultatu, odczekaj 15 minut zanim zaczniesz jeść lub pić.

Pomocne wskazówki:

W przypadku osób posiadających wrażliwe dziąsła, od czasu do czasu może wystąpić efekt łagodnego podrażnienia w postaci pieczenia lub mrowienia.

Należy regularnie konsultować się ze swoim stomatologiem, aby upewnić się, że protezy są dobrze dopasowane.

Używaj tabletek Fittydent w celu dokładnego oczyszczenia protezy z zabrudzeń nierozpuszczalnych w wodzie!

Skład podściółek do protez zębowych Fittydent Super:

Polyvinylacetate, Sodium Carboxymethylcellulose, Glycerintriacetate, Petrolatum.

Zawartość: 15 szt. (30g)

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Posiadanie protezy nie musi być uciążliwe, a dzięki podkładkom pod protezy Fittydent Super nikt z Twoich znajomych nie musi wiedzieć o tym, że ją masz!