

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/fittydent-tabletki-do-czyszczenia-aparatow-ortodontycznych-ruchomych-protez-ochraniaczy-na-zeby-p-1694.html>



Fittydent Tabletki do czyszczenia aparatów ortodontycznych ruchomych, protez, ochraniaczy na zęby

Cena brutto	15,75 zł
Cena netto	12,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Fittydent

Opis produktu

TABLETKI CZYSZCZĄCE

Sposób użycia:

- 1 . Wyjmij protezy i umyj je za pomocą szczoteczki do zębów/protez pod bieżącą wodą.
- 2 . Wrzucić jedną tabletkę do pojemnika z ciepłą wodą.
- 3 . Zanurz protezę/aparat w roztworze przez na co najmniej 5 minut.
- 4 . Wypłucz protezę/aparat pod bieżącą wodą. Przed nałożeniem kleju lub podkładek do protez Fittydent dokładnie wysusz protezę.

Uwaga: Zarówno tabletki jak i roztwór czyszczący nie są przeznaczone do stosowania doustnego.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawiera nadsiarczany: może powodować alergie.

W przypadku dostania się roztworu do oczu, należy przemyć je wodą przez kilka minut.