

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/isonasin-septo-katar-wodnisty-i-gesty-plukanie-nosa-p-1670.html>



## ISONASIN septo katar wodnisty i gęsty - płukanie nosa

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto  | <b>26,00 zł</b>   |
| Cena netto   | <b>24,07 zł</b>   |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
| Producent    | <b>Tactica</b>    |

### Opis produktu

SONASIN septo katar wodnisty i gęsty - wyrób medyczny

ISONASIN septo katar wodnisty i gęsty to roztwór do płukania nosa stosowany przy przeziębieniach i zapaleniu błonicy nosa i gardła, zawierający kompleks upłynniający, tymianek znany ze swoich właściwości antybakteryjnych oraz miedź.

#### Zastosowanie:

Płukanie preparatem ISONASIN septo pozwala na:

- zmniejszenie niedrożności nosa
- usunięcie śluzu oraz czynników powodujących infekcje
- zmniejszenie objawów związanych z przeziębieniem – dzięki zawartości miedzi.

Dzięki temu ISONASIN septo pomaga usprawnić oddychanie.

#### Dawkowanie:

Dwa do trzech płukań dziennie.

1 ampułka zawierająca pojedynczą dawkę o pojemności 5 ml = 1 płukanie obydwu przewodów nosowych.

Preparatu nie należy stosować przez okres dłuższy niż kilka dni.

#### Instrukcja użycia

Otwórz ampułkę zawierającą pojedynczą dawkę.

Uchwyć końcówkę i przekręć ją do momentu całkowitego jej oderwania od ampułki.

Delikatnie naciśnij ampułkę w celu aplikacji roztworu.

Instrukcja użycia do nosa u noworodków, niemowląt i dzieci

Położ dziecko na plecach, z głową odchyloną na jedną stronę. Delikatnie wsuń końcówkę ampułki do otworu nosa. Delikatnie ściśnij ampułkę w celu zaaplikowania wymaganej dawki preparatu. Powtórz ten sam zabieg w odniesieniu do drugiego otworu nosa. W przypadku niemowląt, zawsze należy aplikować preparat przy zastosowaniu minimalnego ciśnienia w celu uniknięcia wystąpienia ryzyka zanieczyszczenia ucha środkowego.

Odczekaj chwilę, pozwalając na to, aby roztwór zaczął działać, następnie unieś głowę dziecka. Delikatnie osusz nadmiar płynu.

---

W przypadku niemowląt, o ile jest to konieczne, nadmiar płynu można również odciągnąć za pomocą aspiratora do nosa.