


Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/mrc-myotalea-lip-trainer-od-2-roku-zycia-elastyczny-aparat-ortodontyczny-p-594.html>

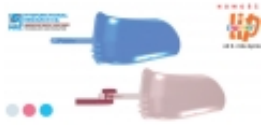

MRC MyoTalea LIP Trainer od 2 roku życia elastyczny aparat ortodontyczny

Cena brutto	170,00 zł
Cena netto	157,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MRC

Opis produktu

Aparat MyoTalea Lip Trainer został zaprojektowany w celu uzyskania odpowiedniego uszczelnienia warg i wzmocnienia mięśni warg.

Budowa

- zderzak wargowy – przeciwdziałanie typowej dla wad klasy II nadaktywności mięśnia bródkowego
- przymocowana tasiemka – do ćwiczenia mięśnia okrężnego ust
- idealny kształt – doskonałe dopasowanie do mięśni okołoustnych
- pasek do ćwiczeń

Wzmocnienie zwarcia wargowego i wyeliminowanie nadaktywności mięśnia bródkowego

Lip Trainer został opracowany z myślą o stosowaniu razem z innymi aparatami czynnościowymi firmy MRC w celu usprawnienia wydolności warg, prawidłowego napięcia warg i wyeliminowania ich nadaktywności podczas połykania.

Działanie Lip Trainera

Złe nawyki czynnościowe często powodują niewłaściwe uszeregowanie zębów i niedostateczny rozwój żuchwy. Zaniechanie korekcji problemów takich jak tłoczenie języka, nieprawidłowe połykanie, oddychanie przez usta i nieprawidłowe układanie języka w ustach ma negatywny wpływ na późniejszy rozwój twarzy i na efekty ewentualnego leczenia ortodontycznego. Wszystkie aparaty serii Trainer System zostały opracowane z myślą o reedukacji mięśni okołoustnych (Myofunctional Effect), która przyczynia się do korekcji uszeregowania zębów i poprawienia pozycji żuchwy. Lip Trainer wspomaga działanie innych aparatów czynnościowych MRC, wystarczy pięć minut ćwiczeń dwa razy dziennie. Może być również stosowany w połączeniu z aparatami stałymi. Lip Trainery wyposażono w specjalne paski, które umożliwiają codzienne ćwiczenia, które polegają na delikatnym, horyzontalnym pociąganiu paska. Jeśli dziecko otwiera usta, ćwiczenia należy powtarzać używając mniejszej siły. Należy ćwiczyć z dzieckiem przez 5 minut 2 razy dziennie.

Dobór aparatu

Niektóre dzieci mogą wykazywać niewystarczającą lub nieodpowiednią aktywność mięśni okołoustnych. Ten problem może się utrzymywać pomimo zastosowania aparatów serii Trainer System lub Myobrace. Lip Trainer jest odpowiedni dla dzieci w każdym wieku, w połączeniu z dowolnym aparatem MRC. Szczególnie sprawdza się w przypadku dzieci, które oddychają przez usta i mają trudności z zamknięciem ust.

Ważne informacje

Najważniejszymi czynnikami umożliwiającymi prawidłowy rozwój zębów i twarzy są

- zwarcie wargowe,
- oddychanie nosem,
- brak aktywności mięśni warg i policzków podczas połykania.

W przypadku aparatów czynnościowych kluczowe jest odpowiednie zmotywowanie pacjenta. Dlatego bardzo ważne jest, aby do leczenia czynnościowego kwalifikować wyłącznie zmotywowanych pacjentów i rodziców – w przeciwnym razie zaleca się stosowanie konwencjonalnych aparatów stałych.

Aparat jest dostępny w wariantach niebieskim, różowym i bezbarwnym.

INSTRUKCJE UŻYCIA

Lip Trainer™ należy stosować przez 5 minut dwa razy dziennie.

Przymocuj pasek do Lip Trainer, popychając go do góry przez otwór w zakładce Myobrace.

Następnie wciśnij go w dół przez otwór na pasku. Pociągnij koniec paska, aby go zamocować.

Włóż Lip Trainer ze zderzakami w dolnej części.

Zamknij usta nad Lip Trainer, przytrzymaj pasek i pociągnij go poziomo, jednocześnie mocno zaciskając usta.

Jeśli Lip Trainer wypadnie, włóż go z powrotem do ust i użyj wystarczającej siły, aby usta utrzymały Lip Trainer na swoim miejscu.

Modyfikuj ćwiczenie, pociągając pasek lekko w górę, a następnie lekko w dół, aby indywidualnie wzmocnić górne i dolne wargi.

Powtarzaj to ćwiczenie przez 5 minut

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR APARATU: niebieski , różowy , bezbarwny