

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/orthoplus-ef-classe-ii-slim-elastyczny-aparat-ortodontyczny-p-136.html>



orthoplus EF Classe II Slim - elastyczny aparat ortodontyczny

Cena brutto	245,00 zł
Cena netto	226,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	orthoplus

Opis produktu

EF Classe II Slim (dawniej EF3) to aparat zaprojektowany z myślą o wczesnym leczeniu interceptywnym fazy I, przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat

Cechami charakterystycznymi aparatu są wąskie zderzaki wargowe i płytki zaporę językową. Noszenie aparatu EF Classe II Slim aktywnie ogranicza negatywny wpływ języka, ust i policzków na wczesne szeregowanie zębów i odblokowuje rozwój żuchwy.

Budowa

- Zderzaki wargowe, kształtem przypominające łyżę, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.
- Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe szeregowanie zębów. Wyposażony we wcięcia na siekacze sprzyjające wczesnemu szeregowaniu zębów.
- Zaporę językową wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna wpływa korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
- Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki czemu odciążają kłykciki i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.



Protruzja żuchwy

Ponadto aparat EF Classe II Slim doskonale sprawdza się w leczeniu wad klasy II ze zgryzem głębokim.

Noszenie aparatu EF Classe II Slim jest szczególnie wskazane w przypadku poważnych stłoczeń w uzębieniu mieszanym.

Pacjent powinien nosić aparat minimum 2 godziny dziennie i bezwzględnie nocą podczas snu – jest to niezbędne dla działania proprioceptywnego. Podczas snu, poprzez biologiczne sprzężenie zwrotne dodatnie, pacjent ćwiczy oddychanie, poprawne układanie języka i pracę warg.

Optymalizowanie leczenia

W trakcie noszenia aparatu pacjent powinien regularnie wypełniać kartę obserwacji, dołączoną do aparatu. Po co najmniej pół roku systematycznego noszenia aparatu pacjent osiągnie trwałe i widoczne wyniki. Należy również pamiętać o prowadzeniu dokumentacji fotograficznej na różnych etapach leczenia, aby móc zilustrować jego rezultaty. Pomaga to zmotywować pacjentów i rodziców pacjentów i zapewnia lepszą współpracę z ich strony.

Pacjent leczony przy użyciu EF Classe II Slim

André – wiek: 10 lat – **początek leczenia:** mesiodens – klasa II, 1 – ząb nadliczbowy między 11 oraz 12



Po ekstrakcji zęba nadliczbowego: po 6 mies. stosowania EF Classe II Slim (sem. ortodontyczny) i następnie 6 mies. stosowania EF T Slim (sem. obserwacji)



Wynik: Zmiana kształtu łuku / zmniejszenie różnicy przednio-tylnej

EF Classe II Slim dostępny jest w jednym rozmiarze.

Dostępny w 5 kolorach



D590 004R



D590 004B



D590 004V



D590 004



D590 005

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR APARATU: niebieski , zielony , czerwony , żółty , bezbarwny