


Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/orthoplus-ef-guide-evolution-elastyczny-aparat-ortodontyczny-p-254.html>

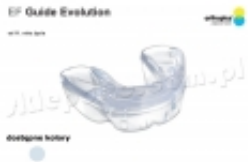

orthoplus EF Guide Evolution - elastyczny aparat ortodontyczny

Cena brutto	295,00 zł
Cena netto	273,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	orthoplus

Opis produktu


EF Guide to aparat przystosowany do leczenia pacjentów z uzębieniem mieszanym i stałym, już od 11 roku życia. Koryguje dysfunkcje ortopedyczne i wady klasy II. Może też służyć jako narzędzie czynnościowego wykańczania leczenia lub retencji.



Budowa

- Zderzaki wargowe, kształtem przypominające łyży, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.
- Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe szeregowanie zębów. Niektóre aparaty wyposażono w dodatkowe wcięcia sprzyjające wczesnemu szeregowaniu zębów.
- Zapora językowa wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna wpływa korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
- Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki czemu odciążają kłykiec i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.
- Ponadto aparat wyposażono we wcięcia na zęby, szeregujące je w łuku.
- Wydłużenie aparatu pozwala na zmieszczenie drugich trzonowców w łuku.

Wcięcie od 4 do 4

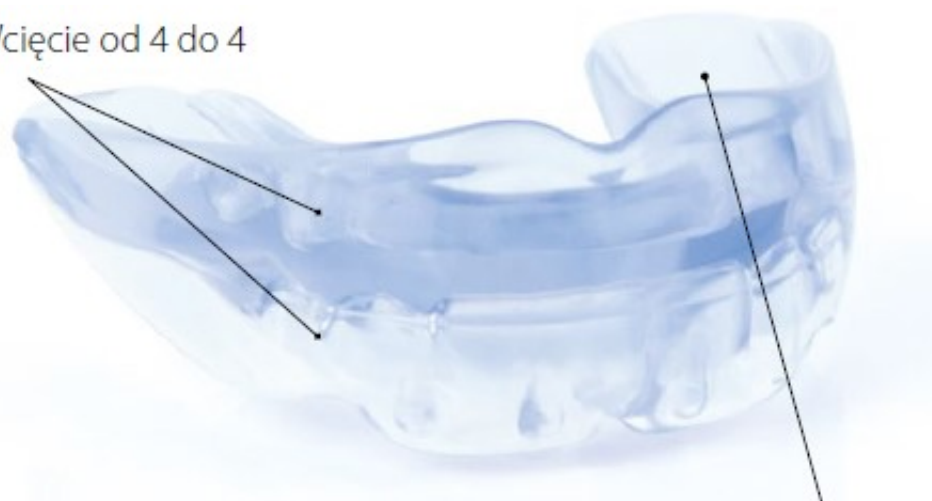

Dystalne poszerzenie



Fizjologiczna pozycja spoczynkowa

TABELA ROZMIARÓW


nr katalogowy	nazwa	rozmiar EF GUIDE™	odpowiada rozmiarowi Multi-P™ LOW	Długość w mm (szczeka górna)
LEFG 0	EF GUIDE size 0	0	35	30.8 - 31.9
LEFG 1	EF GUIDE size 1	1	40	32 - 33.1
LEFG 2	EF GUIDE size 2	2	45	33.2 - 34.3
LEFG 3	EF GUIDE size 3	3	50	34.4 - 35.5
LEFG 4	EF GUIDE size 4	4	55	35.6 - 36.7
LEFG 5	EF GUIDE size 5	5	60	36.8 - 37.9
LEFG 6	EF GUIDE size 6	6	65	38 - 39.1
LEFG 7	EF GUIDE size 7	7	70	39.2 - 40.3

Działanie aparatu


- stopniowe leczenie wad klasy II
- prawidłowe ustawienie żuchwy względem szczęki
- korygowanie złych nawyków
- odblokowanie stawu skroniowo-żuchwowego i żuchwy
- wstępne szeregowanie zębów i szeregowanie przed i po leczeniu aparatem stałym w przypadku cofania się siekaczy na stare miejsce
- rozciąganie włókien w bruzdzie wargowo-bródkowej przy jednoczesnym odsuwaniu mięśni warg
- ograniczenie nadmiernej aktywności wargowo-językowej
- korekcja linii pośrodkowej

Pacjent leczony za pomocą EF Guide Evolution

Clément – wiek: 11 lat – początek leczenia

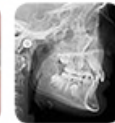

Po 6 mies. stosowania EF T Slim (sem. ortodontyczny) + 6 mies. stosowania EF Guide (sem. obserwacji) + 1 roku noszenia EF Guide dla utrzymania efektu

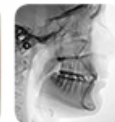

Wyniki: w tym przypadku pacjent był leczony bez aparatu stałego

- Dostępny w 8 rozmiarach od 0 do 7.
- Wcięcie na odcinku od 4 do 4 w górnym i dolnym łuku dla lepszej retencji i również miejsce dla niewyrzniętych zębów.
- Dystalne poszerzenie obejmujące siódemki.

Dostępny w 1 kolorze



LEFG 0 • LEFG 1 • LEFG 2 • LEFG 3
LEFG 4 • LEFG 5 • LEFG 6 • LEFG 7

EF Guide dostępny jest w jednym kolorze w ośmiu rozmiarach

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR APARATU: 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8