

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/orthoplus-ef-start-evolution-elastyczny-aparat-ortodontyczny-p-252.html>

## orthoplus EF Start Evolution - elastyczny aparat ortodontyczny



Cena brutto	<b>275,00 zł</b>
Cena netto	<b>254,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>orthoplus</b>

### Opis produktu

**EF Start Evolution jest przeznaczony dla dzieci z uzębieniem mlecznym lub mieszanym w wieku od 4 do 9 lat.**

Noszenie aparatu aktywnie stymuluje prawidłowy rozwój twarzy i zębów i koryguje złe nawyki, tj. nieprawidłowe połykanie, oddychanie przez usta, ssanie palców i garbienie się. Służy także do leczenia wstępnego przed kompleksowym leczeniem ortodontycznym.

**Stosowanie aparatu EF Start Evolution zaleca się szczególnie do korekcji wad klasy II i III, leczenia zgryzu krzyżowego (przedniego i tylnego) oraz do korekcji linii pośrodkowej.**

#### Budowa

- Zderzaki wargowe, kształtem przypominające łyż, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.
- Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe szeregowanie zębów. Niektóre aparaty wyposażono w dodatkowe wcięcia sprzyjające wczesnemu szeregowaniu zębów.
- Zapora językowa wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna pozwala wpływa korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
- Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki czemu odciążają kłykcie i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.
- Aparat wyposażono w niewielkie wcięcia na górne i dolne siekacze oraz kły.

Wcięcie od 3 do 3



Fizjologiczna pozycja spoczynkowa

#### Działanie aparatu

- odblokowanie żuchwy
- wymuszanie prawidłowej pozycji języka
- korekcja linii pośrodkowej
- stopniowe leczenie wad klasy II, nawet w przypadku dużego nagryzu poziomego (12 do 15 mm)
- odzwyczajanie od złych nawyków
- wstępne szeregowanie zębów

#### Pacjentka leczona przy użyciu EF Start Evolution

Amélie – wiek: 8 lat – **początek leczenia:** nagryz górny + TSALD (zaburzenia wielkości zęba i długości łuku) + zaburzenie linii pośrodkowej



Po 6 miesiącach stosowania EF Start (semestr ortodontyczny) + 6 miesiącach w EF T Slim (semestr obserwowania)



**Wynik:** Eliminacja nagryzu pionowego / ukształtowanie ładnego łuku zębowego

---

EF Start Evolution dostępny jest w jednym rozmiarze

- Uniwersalne wcięcie na odcinku od 3 do 3 w górnym i dolnym łuku dla niwelizacji linii pośrodkowej.

Dostępny w 3 kolorach



D590 220R



D590 220B



D590 220

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR APARATU:** niebieski , różowy , bezbarwny