

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/orthoplus-ef-t-slim-elastyczny-aparat-ortodontyczny-p-253.html>



orthoplus EF T Slim - elastyczny aparat ortodontyczny

Cena brutto	265,00 zł
Cena netto	245,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	orthoplus

Opis produktu

Noszenie aparatu EF T Slim jest wskazane w przedortodontycznym leczeniu wad klasy II u dzieci w wieku od 8 do 11 lat z uzębieniem mieszanym.



Jego właściwości dają wiele możliwości leczenia, między innymi korekcję linii pośrodkowej.


Noszenie aparatu pozwala także na pozbycie się złych nawyków, tj. oddychanie przez usta, ssanie palców, nieprawidłowe połykanie.

Aparat EF T Slim wyróżnia się satynową powierzchnią.

Budowa

- Zderzaki wargowe, kształtem przypominające łyż, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.
- Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe szeregowanie zębów. Niektóre aparaty wyposażono w dodatkowe wcięcia sprzyjające wczesnemu szeregowaniu zębów.
- Zapora językowa wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna wpływa korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
- Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki czemu odciążają kłykie i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.
- Aparat wyposażono w niewielkie wcięcia na górne i dolne siekacze przyśrodkowe i boczne.

Wcięcie od 3 do 3

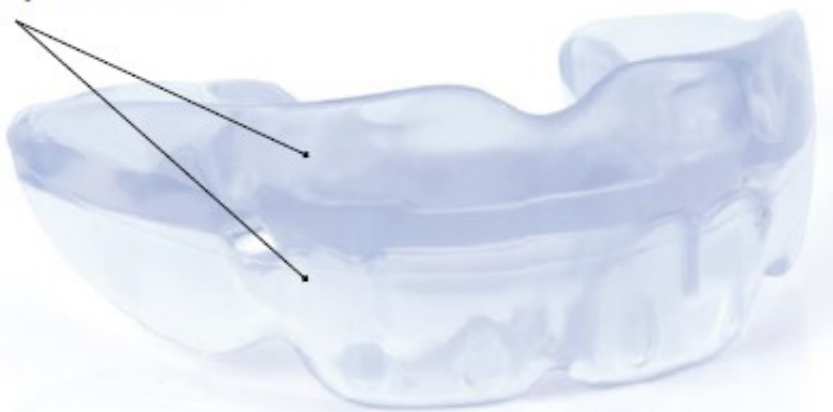

Fizjologiczna pozycja spoczynkowa

Działanie aparatu

- korekcja ortopedyczna przeciwdziałająca wyrzynaniu się zębów w niewłaściwych miejscach
- wstępne szeregowanie zębów
- odblokowanie stawu skroniowo-żuchwowego
- wymuszanie prawidłowej pozycji języka
- stopniowe leczenie wad klasy II
- wyeliminowanie nadmiernej aktywności wargowo - językowej
- ekspansja i kształtowanie łuku zębowego
- rozciąganie włókien w bruzdzie wargowo-bródkowej przy jednoczesnym odsuwaniu mięśni warg
- korekcja linii pośrodkowej

Pacjent powinien nosić aparat minimum 2 godziny dziennie i bezwzględnie nocą podczas snu - jest to niezbędne dla działania proprioceptywnego. Podczas snu, poprzez biologiczne sprzężenie zwrotne dodatnie, pacjent ćwiczy oddychanie, poprawne układanie języka i pracę warg.

Pacjentka leczona z zastosowaniem aparatu EF T Slim

Manon – wiek: 8 lat – **początek leczenia:** patologia linii pośrodkowej – przedwczesne wyrzynanie 73 oraz 83



Po 1 roku leczenia przy użyciu EF T Slim



Wynik: Przestrzeń wytworzona dla 33 oraz 43 – śtłoczenie: 11 mm zmniejszone do 4 mm. Rozpoczęcie leczenia aparatem stałym

EF Start Evolution dostępny jest w jednym rozmiarze

- Uniwersalne wcięcie na odcinku od 3 do 3 w górnym i dolnym łuku dla niwelizacji linii pośrodkowej.

Dostępny w 5 kolorach



Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR APARATU: niebieski , zielony , czerwony , żółty , bezbarwny