

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/orthoplus-prepo-plus-pozycjoner-elastyczny-aparat-ortodontyczny-p-576.html>



orthoplus PREPO-PLUS pozycjoner - elastyczny aparat ortodontyczny

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	184,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	orthoplus

Opis produktu

Pozycjoner PREPO PLUS jest przeznaczony do stabilizowania pozycji zębów po zakończeniu leczenia aparatem stałym.

Pozycjoner PREPO PLUS jest wytwarzany metodą wtryskową z miękkiego tworzywa typu Food Grade (dopuszczonego do stosowania w żywności). Wyposażono go w podwójną szynę, pasującą do górnych i dolnych łuków, która utrzymuje zęby w prawidłowej pozycji i pozwala tkankom miękkim i mięśniom przystosować się do nowego układu zgryzu. Może także korzystnie wpłynąć na szczegóły estetyczne.

Opracowano 3 rodzaje pozycjonerów PREPO PLUS, pasujące do przypadków:

- bez ekstrakcji,
- po ekstrakcji pierwszych górnych przedtrzonowców,
- po ekstrakcji pierwszych górnych i dolnych przedtrzonowców.

Tabela rozmiarów

WYBÓR ROZMIARU DLA PACJENTA:

- Dzięki pomocy linijki pomiarowej PREPO Plus jest łatwy wprowadzić do stosowania w codziennej praktyce
- Rozmiar mierzony jest w milimetrach od strony policzkowej od kąta do kąta (dystalnie)
- Umieścić linijkę dystalnie na brzegu siecznym kąta i przyłożyć dystalnie do przeciwnego kąta aby odczytać rozmiar odpowiedni dla Twojego pacjenta

No extraction	Extraction 4 4	Extraction 4 4
S 42	D 45	Q 45
S 43	D 46	Q 46
S 44	D 47	Q 47
S 45	D 48	Q 48
S 46	D 49	Q 49
S 47	D 50	Q 50
S 48	D 51	Q 51
S 49	D 52	Q 52
S 50	D 53	Q 53
S 51	D 54	Q 54
S 52	D 55	Q 55
S 53	D 56	Q 56
S 54		Q 57
S 55		Q 58
S 56		Q 59
S 57		Q 60
S 58		

Działanie aparatu

-
- retencja po leczeniu aparatem stałym
 - prawidłowe zaguzkowanie po zdjęciu aparatu stałego
 - tymczasowa retencja przed retencją stałą
 - finishing po leczeniu aparatem stałym

Przeciwwskazania

- asymetria zgryzu
- wrodzony brak zawiązków siekaczy
- faza wzrostu pionowego
- bruksizm (ryzyko uszkodzenia lub przegryzienia aparatu)

Zakładanie, noszenie i higiena pozycjonera

Pacjent powinien zakładać pozycjoner zaczynając od górnych kłów – pozycjoner sam dopasuje się do pozostałych zębów. Po założeniu pozycjonera pacjent powinien go mocno zagryźć przez 10 sekund (nie żuć), następnie zrobić kilka sekund przerwy, znów zagryźć i powtarzać cykl przez ok. 3 minuty.

Pacjent powinien nosić pozycjoner podczas wykonywania prac domowych, czytania, oglądania telewizji, itp.

Pozycjoner należy nosić także w nocy.

Czas noszenia

Natychmiast po zakończeniu leczenia aparatem stałym pacjent powinien nosić PREPO Plus.

- przez pierwsze 3 dni: od 4 do 6 godzin dziennie
- kolejne trzy tygodnie: od 2 do 3 godzin dziennie
- następnie: pacjent powinien kontynuować noszenie PREPO Plus przez co najmniej 1-2 godzin dziennie
- w nocy pacjent powinien nosić PREPO Plus w nocy

UWAGA!

Pacjent może gubić aparat podczas pierwszych dni noszenia w nocy. Po kilku dniach aparat dopasuje się. **Czas noszenia powinien być podany przez lekarza.** Pacjent musi być poinformowany aby powstrzymać się od żucia aparatu.

Pozycjoner jest wykonany z delikatnego tworzywa i należy obchodzić się z nim delikatnie. Po każdym użyciu należy opłukać go zimną wodą i delikatnie wyszczołkować z użyciem pasty do zębów.

Nie wolno płukać PREPO Plus gorącej wodzie - może to wpłynąć na jego kształt.