


Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/plytka-jezykowa-equilibrator-lingwalny-niki-p-1584.html>

Płytki językowe equilibrator lingwalny NIKI

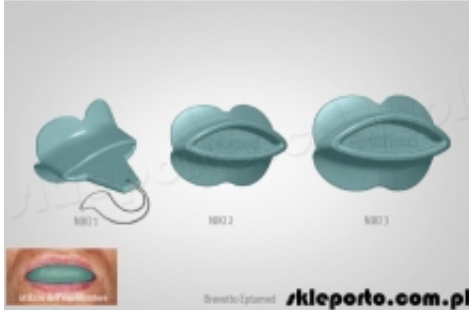

Cena brutto	190,00 zł
Cena netto	175,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Eptamed

Opis produktu


Equilibrator lingwalny tzw. językowy NIKI to bardzo wygodny aparat odpowiedni zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Mają na celu wyrobienie nawyku prawidłowego pozycjonowania języka.

Brak prawidłowego zwarcia warg uniemożliwia wytworzenie odpowiedniego podciśnienia wewnątrz jamy ustnej, co w konsekwencji prowadzi do niepoprawnego połykania śliny. Dzięki stosowaniu płytki język układa się prawidłowo oraz uzyskujemy ekspansję podniebienia. Urządzenia te, chociaż nie mają bezpośredniego kontaktu z zębami, posiadają niezwykłą zdolność ortodontyczną.

- bardzo wygodne w noszeniu,
- doskonale sprawdzają się u najmłodszych dzieci
- przyspieszają uzyskanie pożądanego efektów leczenia u dorosłych pacjentów,
- ułatwiają ekspansję podniebienia,
- wymagają niewielkiego wysiłku ze strony pacjentów,
- można je łączyć w terapiach leczenia przy stosowaniu innych Equilibratorów

Rozmiary:

rozmiar 1 dla pacjentów w wieku od 3 do 8 lat
rozmiar 2 dla pacjentów w wieku od 9 do 16 lat
rozmiar 3 dla pacjentów w wieku od 17 lat wzwyż

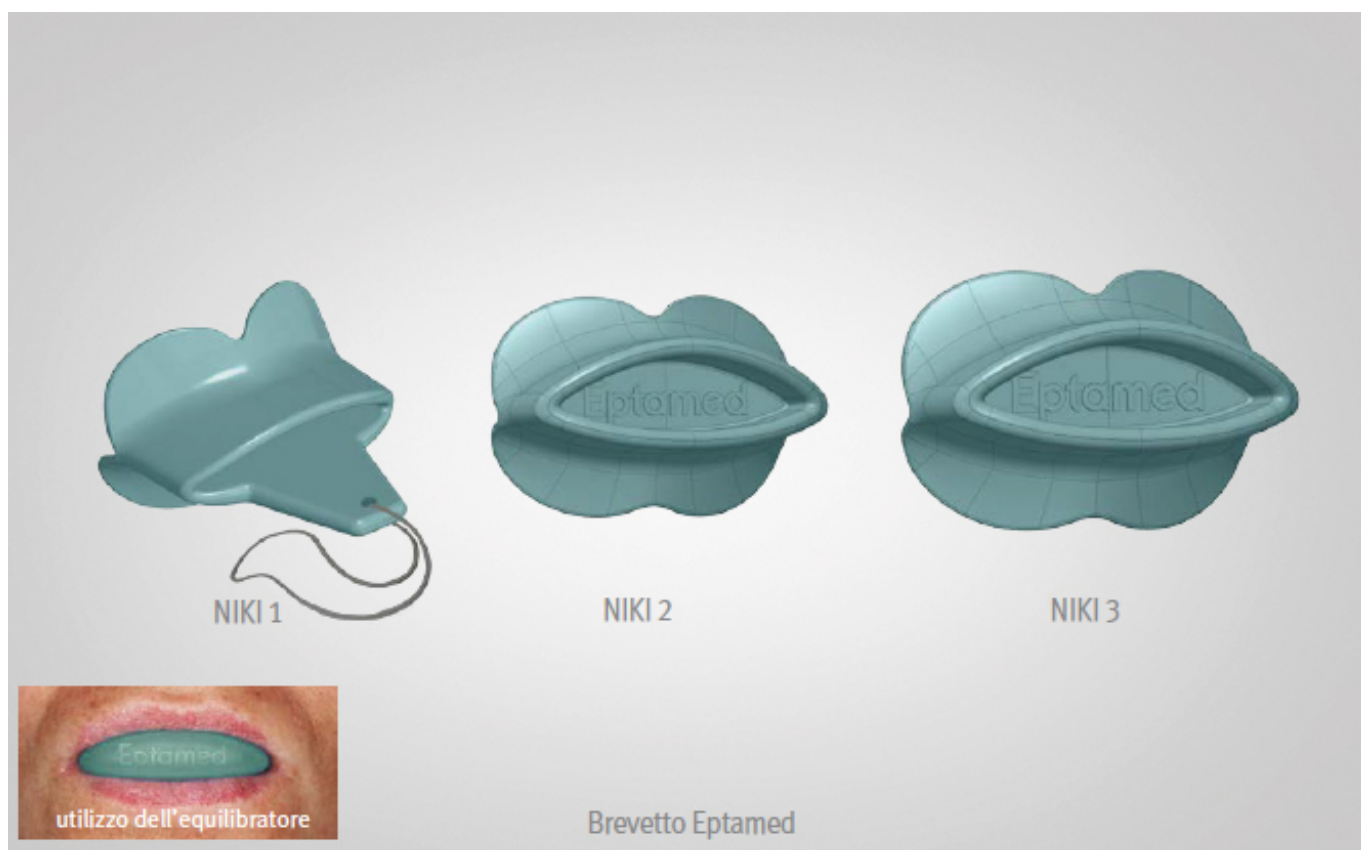

- Idealny w terapiach leczenia wad klasy I, II, III
- Skuteczny w leczeniu zwiększonego nagryzu poziomego - overjet
- Skuteczny w leczeniu zwiększonego nagryzu pionowego - overbit
- Skuteczny w leczeniu wad zgryzu otwartego
- Skuteczny w leczeniu wad zgryzu krzyżowego

Equilibratory językowe z serii NIKI są skutecznym narzędziem w procesie reedukacji czynności połykania.

Powinny być umieszczane między wargami a zębami i stosowane przez 60 minut dziennie przez okres od 30 do 90 dni chyba, że terapeuta zaleci inaczej.

Ich używanie odbywa się wyłącznie w ciągu dnia i podczas zajęć rekreacyjnych, dlatego nie wymagają one aktywnego trybu użytkowania.

Ten model aparatów jest zalecany do stosowania przed rozpoczęciem jakiegokolwiek innej terapii ortodontycznej. Zalecana jest zawsze szczegółowa analiza przypadku.

Pudełko na aparat dostępne w kolorze białym.



NIKI 1 - bambini



NIKI 2 - adulti



Prodotk posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR APARATU: 1 , 2 , 3