

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/pola-day-6-zel-do-wybielania-zebow-p-1756.html>



Pola Day 6 % - żel do wybielania zębów

Cena brutto	49,90 zł
Cena netto	40,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	SDI

Opis produktu

Pola Day 6% - żel wybielający. Strzykawka zawiera 3 gramy żelu.

Spełnia wymogi przepisów Komisji Europejskiej zmieniających Dyrektywę 75/768/ EWG dotyczącą produktów kosmetycznych.

Naturalne ukojenie i ochrona zębów:

Specjalne składniki minimalizują tworzenie się kamienia nazębnego i wspomagają remineralizację zębów, a ryzyko nadwrażliwości pozabiegowej jest zminimalizowane.

Wysoka zawartość wody w żelu przeciwdziała odwodnieniu szkliwa i obniża nadwrażliwość pozabiegową.

Wysoka masa cząsteczkowa zagęszcza: Przeciwdziała uczuciu klejenia i wysychaniu żelu, a dodatkowo redukuje nadwrażliwość zębów.

Lepkość: Dzięki wysokiej lepkości żelu, jego aplikacja do nakładek jest łatwa i bezpieczna, a żel pozostaje w miejscu przez cały czas trwania zabiegu.

Smak: Przyjemny miętowy smak żelu daje długotrwałe uczucie świeżości.

Uwalnianie fluoru:

Zawarty w preparatach Pola Day fluor remineralizuje powierzchnię szkliwa i redukuje nadwrażliwość pozabiegową.


Zawartość środków łagodzących:

Żele Pola Day zawierają środki znoszące nadwrażliwość. Środki te działają na zakończenia nerwowe, znieczulając je na styku miazgi z zębina, czego rezultatem jest minimalizacja nadwrażliwości pozabiegowej i maksymalizacja komfortu pacjenta.

Naturale pH:

Dzięki naturalnemu pH produktów Pola Day następuje całkowite uwolnienie nadtlenu bez narażania komfortu pacjenta.

1. Umieścić małą kroplę żelu w każdym pojemniczku nakładki odpowiadającemu zębom poddawany zabiegowi.

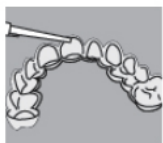

2. Umieścić nakładkę z żelem w pobliżu zębów.



3. Za pomocą ściereczki lub miękkiego pędzelka wytrzeć nadmiar żelu w jamie ustnej.



4. Usunąć nakładkę po zakończeniu zabiegu. Wypłukać nakładkę i jamę ustną letnią wodą.



5. Wyszczotkować zęby.



16% nadłtenu karbamidu = 5,7% nadłtenu wodoru

Produkt można stosować powyżej 18 roku życia.

Sprzedaż gabinetom stomatologicznym.