

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/pola-night-zel-wybielajacy-16-bezsmakowy-wybielanie-zebow-p-40.html>



Pola Night żel wybielający 16 % bezsmakowy - wybielanie zębów


Cena brutto	19,90 zł
Cena netto	16,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	SDI

Opis produktu

Pola Night 16% do nocnego wybielania zębów o smaku miętowym. Nakładki powinny być wypełnione żelą w takiej ilości aby po założeniu na zęby, żel nie wyciekał; na dziąsła, najlepiej jest stosować w nocy. Należy starannie przed zastosowaniem wyszczotkować zęby używając pasty do zębów.

Czas stosowania dobiera się w zależności od potrzeb pacjenta co drugą lub trzecią noc. Po zdjęciu nakładek należy dobrze wypłukać zęby, aż do usunięcia całkowitego żelu. Nie połykać. W trakcie stosowania preparatu należy używać past do zębów bardzo łagodnych i działających przeciwko nadwrażliwości zębów.

1. Umieścić małą kroplę żelu w każdym pojemniczku nakładki odpowiadającemu zębom poddawanych zabiegowi.

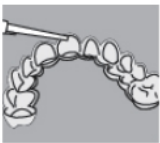

2. Umieścić nakładkę z żelą w pobliżu zębów.



3. Za pomocą ściereczki lub miękkiego pędzelka wytrzeć nadmiar żelu w jamie ustnej.



4. Usunąć nakładkę po zakończeniu zabiegu. Wypłukać nakładkę i jamę ustną letnią wodą.



5. Wyszczotkować zęby.



UWAGA! Nie wolno:

1. Stosować u kobiet w ciąży i w czasie karmienia piersią.
2. Jeść podczas noszenia nakładki.
3. Używać wyrobów tytoniowych (np. papierosy itp.) z założoną nakładką.
4. Wystawiać strzykawek z żelem na działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.
5. Zamrażać strzykawek z żelem. Kuracje można powtarzać nie wcześniej niż po upływie 1/2 roku.

Dla podtrzymania wybielonych zębów oraz uzyskania lepszych efektów, po upływie 2 miesięcy zalecane jest stosowanie wybielających past lub płynów do zębów

16% nadtlenu karbamidu = 5,7% nadtlenu wodoru

Produkt można stosować powyżej 18 roku życia.

Sprzedaż gabinetom stomatologicznym.