

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/riva-luting-15-g-proszek-10-7-ml-plyn-glasjonomer-do-mieszania-recznego-p-1268.html>



Riva luting 15 g proszek + 10,7 ml płyn - glasjonomer do mieszania ręcznego

Cena brutto	196,00 zł
Cena netto	181,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	SDI

Opis produktu

Riva Luting to dający kontrast w rtg chemoutwardzalny cement szkło-jonomerowy idealny do osadzania prac protetycznych.

Materiał charakteryzuje się dobrą adhezją do twardych tkanek zęba, wysokim uwalnianiem fluoru i optymalną konsystencją, co powoduje, że znajduje on wiele zastosowań klinicznych. Materiał Riva Luting posiada uniwersalny jasnożółty odcień i jest dostępny w postaci kapsułek lub zestawów proszek/płyn.

WSKAZANIA:

- Osadzanie koron, mostów i wkładów PFM
- Osadzanie koron wykonanych ze stopu
- Osadzanie wkładów i umocowań
- Osadzanie metalowych zamków ortodontycznych
- Podkład lub wyścielacz

NSTRUKCJA POSTĘPOWANIA RIVA SILVER - ZESTAW PROSZEK/PŁYN:

Proporcja proszek/płyn (g/g) 1.8/1.0 (1 miarka proszku na 2 krople płynu)
Czas mieszania 20 sekund Czas pracy (min., sek.) 2'00"
Czas wstępnego wiązania (min., sek.) 2'20"
Warunki badania: temperatura (23^o±1^oC), wilgotność względna (50±10%) ISO 9917-1 (Cement dentystyczny zarabiany wodą)

OPRACOWANIE:

Odizoluj i oczyść ząb.
Nie przesuszaj.
Nie usuwaj warstwy mazistej. Jeśli niezbędna jest dodatkowa ochrona miazgi zęba, zastosuj wyścielacz na bazie wodorotlenku wapnia.

ZALECANY SPOSÓB MIESZANIA PROSZKU I PŁYNU:

1. Zdejmij delikatnie osłonkę z pojemnika z proszkiem. Używając plastikowej miarki odmierz i przenieś jedną porcję proszku na płytkę do mieszania.
2. Delikatnie odmierz jedną kroplę płynu i przenieś na płytkę do mieszania w pobliże porcji proszku. Zamknij szczelnie pojemnik.
3. Przy użyciu szpatułki z tworzywa połącz całą porcję proszku z płynem. Mieszaj przez 20 sekund do uzyskania jednnorodnej konsystencji materiału.

UWAGA:

Jeśli masz zamiar mieszać większe ilości cementu, podziel porcję proszku na dwie równe części. Mieszaj płyn z częścią proszku przez 5 sekund, a następnie dodaj pozostałą część proszku i mieszaj przez kolejne 15 sekund (całkowity czas mieszania – 20 sekund)

OSADZANIE PRACY:

1. Upewnij się, czy wewnętrzna część uzupełnienia protetycznego, które zamierzasz osadzić, jest czysta i sucha.

2. Zaaplikuj 1mm warstwę cementu na powierzchnię uzupełnienia.

3. Zacementuj uzupełnienie w ciągu 30 sekund od rozpoczęcia mieszania. UWAGA: Unikaj przepełniania koron cementem. Temperatura wyższa niż 23°C / 74°F przyspieszy wiązanie materiału.

4. Usuń nadmiary materiału po wstępnym związaniu.

UWAGA:

Dalsze postępowanie z cementem po przekroczeniu czasu pracy może upośledzić adhezję materiału.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Do zastosowań zewnętrznych.
- Nie podawaj produktów SDI Riva w postaci iniekcji
- Nie rozpakowuj kapsułek z foliowych osłonek dopóki nie będą używane.
- Nie stosuj po upływie daty ważności.
- Nie mieszaj proszku lub płynu z innymi rodzajami czy markami cementów szkło-jonomerowych.
- Nie stosuj materiału Riva Luting u pacjentów rozpoznaną nadwrażliwością na żywice.
- Ostrzeżenie: Pod rygorem prawa zaleca się sprzedaż wyłącznie na potrzeby dentystów.
- Certyfikaty bezpieczeństwa dostępne na: www.sdi.com.au lub u przedstawiciela regionalnego.

PIERWSZA POMOC:

- Oczy (kontakt): Przemyjaj wodą przez 15 minut i zapewnij pomoc medyczną.
- Skóra (kontakt): Usuń z powierzchni skóry za pomocą materiału lub gąbki zanurzonych w alkoholu. Przemyj niezwłocznie wodą.
- Przyjęcie doustne: Polec pacjentowi dokładnie wypłukać usta. Nakaż wypicie znacznej ilości wody/mleka. Zapewnij pomoc medyczną w razie utrzymywania się objawów zatrucia.

PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE:

- Nie rozpakowuj kapsułek Riva Luting z foliowych osłonek dopóki nie będą używane.
- Przechowuj w temperaturze w zakresie 4 - 20°C (39 - 68°F).
- Używaj w temperaturze pokojowej w zakresie 20 - 25°C (68 - 77°F)