

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/riva-luting-plus-25-g-proszek-8-9-ml-plyn-glasjonomer-do-mieszania-recznego-p-1269.html>



Riva luting plus 25 g proszek + 8,9 ml płyn - glasjonomer do mieszania ręcznego

Cena brutto	285,00 zł
Cena netto	263,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	SDI

Opis produktu

Riva Luting Plus to chemoutwardzalny cement szkło-jonomerowy modyfikowany żywicą do osadzania prac protetycznych dający kontrast na zdjęciach rtg.

Z uwagi na doskonałą adhezję do tkanek zęba, znaczące uwalnianie fluoru i optymalną płynność znajduje zastosowanie w szerokiej gamie sytuacji klinicznych. Materiał Riva Luting Plus jest dostępny w formie kapsulek i zestawów proszek/płyn w uniwersalnym jasnożółtym odcieniu.

WSKAZANIA:

- Osadzanie prac kompozytowych, metalowych lub metalowych licowanych porcelaną (wkłady, nakłady, korony i mosty).
- Osadzanie wkładów i nakładów porcelanowych.
- Osadzanie indywidualnych i standardowych wkładów koronowokorzeniowych.
- Osadzanie koron pełnoceramicznych.

PRZECIWSKAZANIA:

- Przykrycie bezpośrednie miazgi.
- Produkt może spowodować u niektórych pacjentów podrażnienie skóry. Zrezygnuj wówczas z dalszego stosowania materiału i wezwij pomoc medyczną. Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów, u których stwierdzono alergie na żywice akrylowe.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:

PRZYGOTOWANIE

- Odizoluj i oczyść ząb. Jeśli niezbędna jest dodatkowa ochrona miazgi zęba, zastosuj wyścielacz na bazie wodorotlenku wapnia.
- Przygotowanie powierzchni zęba preparatem Riva Conditioner i) Zaaplikuj uzdatniacz Riva Conditioner (SDI Limited) na opracowane powierzchnie zęba. ii) Pozostaw na 10 sekund. iii) Wyplucz dokładnie wodą. iv) Usuń nadmiar wody czystym powietrzem (nie przesuszaj powierzchni zęba). i) Zaaplikuj Super Etch (SDI Limited) na opracowane powierzchnie zęba. ii) Pozostaw na 5 sekund. iii) Wyplucz dokładnie wodą. iv) Usuń nadmiar wody czystym powietrzem (nie przesuszaj powierzchni zęba).

DOZOWANIE I MIESZANIE PROSZKU ORAZ PŁYNU:

- Zdejmij delikatnie osłonkę z pojemnika z proszkiem. Używając podwójnej plastikowej miarki odmierz i przenieś dużą lub małą porcję proszku (w zależności od ilości materiału, której będziesz potrzebować) na płytkę do mieszania.
- Delikatnie odmierz płynu przenieś na płytkę do mieszania w pobliże porcji proszku: Duża miarka proszku: 3 krople płynu; Mała miarka proszku: 1 kropla płynu;
- Mieszaj proszek i płyn przy użyciu plastikowej szpatułki przez 20 sekund do osiągnięcia homogennej konsystencji. Uwaga: Podziel proszek na dwie równe części. Mieszaj płyn z częścią proszku przez 5 sekund, a następnie dodaj drugą porcję proszku kontynuując mieszanie przez kolejne 15 sekund (w sumie 20 sekund). Po użyciu szczelnie zamknij pojemnik z proszkiem i butelkę z płynem. Typ podłoża do zarabiania materiału: podłoże papierowe lub płytka szklana. Uwaga: Możesz wydłużyć czas pracy z materiałem używając zimnej szklanej płytki do jego zarabiania.

OSADZANIE PRAC PROTETYCZNYCH:

- Upewnij się, że wewnętrzna powierzchnia uzupełnienia protetycznego jest wyczyszczona, sucha i przygotowana zgodnie z zaleceniami.

b) Zaaplikuj na odpowiednią powierzchnię uzupełnienia warstwę cementu grubości około 1 mm.

c) Osadź uzupełnienie najpóźniej 30 sekund po zakończeniu mieszania cementu. Uwaga: Nie przepelniaj koron cementem. Temperatura wyższa niż 23°C/73°F spowoduje skrócenie czasu pracy.

d) Po wstępnym związaniu materiału usuń nadmiary. Uwaga: Poruszanie uzupełnieniem i cementem po upływie czasu pracy spowoduje pogorszenie adhezji.

e) Upewnij się, że pole zabiegowe będzie odizolowane od dostępu śliny do momentu ostatecznego związania cementu.

PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE •

Do not remove Riva Luting Plus capsules from their foil packets until ready to use.

• Store at temperatures between 4°C - 20°C (39°F - 68°F) for capsules and 4°C - 25°C (39°F - 77°F) for powder liquid kits. Use at room temperature between 20°C and 25°C (68°F - 77°F).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przeznaczone dla profesjonalnych zastosowań dentystycznych Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Do zastosowań zewnętrznych. Nie stosuj po upływie daty ważności. Nie mieszaj proszku lub płynu z innymi rodzajami czy m arkami cementów szkło-jonomerowych. Ostrzeżenie: Pod rygorem prawa zaleca się sprzedaż wyłącznie na potrzeby dentystów. Certyfikaty bezpieczeństwa materiału dostępne na: www.sdi.com.au lub u przedstawiciela regionalnego.

PIERWSZA POMOC:

Oczy (kontakt): Przemij niezwłocznie wodą i zapewnij pomoc medyczną.

Skóra (kontakt): Usuń z powierzchni skóry za pomocą materiału lub gąbki zanurzonych w alkoholu. Przemij niezwłocznie wodą.

Przyjęcie doustne: Nakaż wypicie znacznej ilości wody/mleka. Zapewnij pomoc medyczną w razie utrzymywania się objawów zatrucia.

Wchłonięcie (proszek): Zapewnij dopływ świeżego powietrza.

Zapewnij pomoc medyczną w razie wystąpienia trudności w oddychaniu.

ODCIEŃ: - jasnożółty

Zestwy proszek (25g)/płyn (10g / 8.95mL)