

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/riva-silver-32-g-proszek-8-9-ml-plyn-glasjonomer-do-mieszania-recznego-p-1271.html>



## Riva silver 32 g proszek + 8,9 ml płyn - glasjonomer do mieszania ręcznego

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto  | <b>579,00 zł</b>  |
| Cena netto   | <b>536,11 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
| Producent    | <b>SDI</b>        |

### Opis produktu

**Riva Silver to wzmocniony srebrem cement szkło-jonomerowy dający kontrast w rtg.**

Charakteryzuje się doskonałą adhezją do twardych tkanek zęba, stałym uwalnianiem fluoru i świetnymi właściwościami mechanicznymi. Riva Silver sprawdza się w wielu zastosowaniach klinicznych.

**Odcień: Jasno Szary.**

#### WSKAZANIA:

Niewielkie wypełnienia I i II klasy, wypełnienia w zębach mlecznych, odbudowa rdzenia (filaru), odbudowy gdzie przezierność nie jest wymagana, ochrona powierzchni korzenia, wypełnienia klasy V w miejscach gdzie estetyka nie jest istotna, podkład pod wypełnienia kompozytowe, uszczelniając bruzdy i szczeliny, wypełnienia czasowe.

#### INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA RIVA SILVER - ZESTAW PROSZEK/ PŁYN: PRZYGOTOWANIE:

- Oczyszczyć i odizolować ząb. Uwaga: Opracować ubytek stosując techniki leczenia zachowawczego i odpowiednie instrumenty. Podcięcia nie są konieczne.
- W przypadkach gdzie konieczna jest ochrona miazgi, użyć preparatu na bazie wodorotlenku wapnia.

#### KONDYCJONOWANIE / WYTRAWIANIE:

- Pokryć opracowywaną powierzchnię uzdatniaczem Riva Conditioner i pozostawić na 10 sekund LUB Zastosować 37% kwas fosforowy Super Etch i pozostawić na 5 sekund.
- Wypłukać dokładnie wodą. 3. Usunąć nadmiar wody. Zachować wilgotność. Unikać zanieczyszczenia. WAŻNE: Nie przesuszać powierzchni. Powierzchnia powinna być nieco wilgotna.

#### ZAŁECANY SPOSÓB MIESZANIA PROSZKU I PŁYNU

Dozowanie proszku – płynu: 1 płaska miarka na 1 kroplę Proporcja proszku – płynu: 0.300g/0.043g (7:1)

Zalecany czas mieszania: 30 sekund

Warunki badania: temperatura ( $23\pm1^{\circ}\text{C}$ ), wilgotność względna ( $50\pm10\%$ ). ISO 9917-1 (Cement szklano-polialkenowy nieprzezierny i nieprzepuszczalny dla promieni rtg)

Rodzaj podłoża do mieszania: papier nie wchłaniający wilgoci lub szklana płytka.

**UWAGA:** Dla wydłużenia czasu pracy schłódź płytkę do mieszania. Unikaj kondensacji.

- Zdejmij delikatnie osłonkę z pojemnika z proszkiem Riva Silver.
- Używając plastikowej miarki odmierz i przenieś jedną porcję proszku na płytkę do mieszania.
- Delikatnie odmierz jedną kroplę płynu Riva Silver i przenieś na płytkę do mieszania w pobliże porcji proszku. Zamknij delikatnie pojemnik.
- Używając szpatułki z tworzywa podziel proszek na dwie równe części.
- Mieszaj płyn z częścią proszku przez 10 sekund, a następnie dodaj drugą porcję proszku kontynuując mieszanie przez kolejne 15-20 sekund.

---

## **APLIKACJA CEMENTU:**

1. Zaaplikuj Riva Silver do ubytku zwracając uwagę, aby pod materiał nie dostało się powietrze.

**UWAGA:** Czas pracy w temperaturze 23°C/74°F wynosi około 90 sekund (1'30"). Wyższa temperatura przyspieszy wiązanie materiału. Praca materiałem po związaniu może upośledzić jego adhezję.

2. Zaaplikuj lakier ochronny Riva Coat na wszystkie powierzchnie wypełnienia.

3. Polimeryzuj światłem przez 20 sekund.

4. Po upływie przynajmniej 6 minut od zakończenia mieszania dokonaj wykończenia odbudowy stosując standardowe techniki.

5. Ponownie zaaplikuj lakier ochronny Riva Coat.

6. Polimeryzuj światłem przez 20 sekund.

7. Zaleć pacjentowi powstrzymanie się od spożywania posiłków przez godzinę od zakończenia postępowania.

## **PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE:**

- Do not remove Riva Silver capsules from their foil packets until ready to use.
- Store at temperatures between 4°C - 20°C (39°F - 68°F) for capsules and 4°C - 30°C (39°F - 86°F) for powder liquid kits.
- Use at room temperature between 20°C and 25°C (68°F - 77°F).

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Kontakt z powyższymi materiałami może spowodować podrażnienie skóry lub tkanek jamy ustnej. Należy wówczas przerwać pracę i zapewnić pacjentowi pomoc medyczną.

Do zastosowań zewnętrznych.

Nie podawaj produktu SDI Riva w postaci iniekcji.

Nie przechowuj w ujemnych temperaturach.

Nie mieszaj proszku lub płynu z innymi rodzajami czy markami cementów szkło-jonomerowych.

## **Ostrzeżenie:**

Pod rygorem prawa zaleca się sprzedaż wyłącznie na potrzeby dentystów.

Certyfikaty bezpieczeństwa materiału dostępne na: [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) lub u przedstawiciela regionalnego

## **PIERWSZA POMOC:**

Oczy (kontakt): Przemywaj wodą przez 15 minut i zapewnij pomoc medyczną.

Skóra (kontakt): Usuń z powierzchni skóry za pomocą materiału lub gąbki zanurzonych w alkoholu. Przemyj niezwłocznie wodą.