

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/stymulator-nosowy-do-oddychania-p-577.html>



Stymulator nosowy do oddychania

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	137,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	orthoplus

Opis produktu

Budowa

- tubki przewodzące, wypukłe po zewnętrznej stronie, napinające skrzydełka nosa
- taśmka stabilizująca łącząca tubki
- zakładka stymulująca pracę przyczepów mięśniowych w obszarze skrzydełek nosa
- zewnętrzna krawędź zabezpieczająca przed obijaniem się tubelek o nos

Stymulator oddychania jest przeznaczony dla pacjentów, którzy mają problemy z opadaniem skrzydełek nosa, a w rezultacie tego z oddychaniem przez nos.

Ponadto zaleca się noszenie stymulatora, gdy wymagana jest korekcja nawyku oddychania przez usta. Stymulator usprawnia przepływ powietrza przez nos, dlatego jego noszenie łagodzi także chrapanie i objawy bezdechu nocnego, a także zwiększa ilość tlenu dostarczanego do pęcherzyków płucnych.

Po upływie 7-9 mies. stosowania średnica nozdrzy pacjenta powinna się powiększyć, a pacjent powinien oddychać swobodniej. Po 9 mies. od zaprzestania stosowania efekty terapii mogą zacząć zanikać. W takim wypadku zaleca się kontynuowanie ciągłej terapii w przypadku pacjentów chrapiących, oraz wznowianie terapii na 3 mies. co pół roku przez pacjentów, którzy mają tendencje do oddychania przez usta. Noszenie stymulatora do nosa może stanowić

doskonałe rozwiązanie dla pacjentów cierpiących na bezdech nocny. W niektórych przypadkach wskazane jest także dodatkowo stosowanie aparatu zapobiegającego tłoczeniu języka, aby zmotywować pacjenta do oddychania nosem.

Działanie stymulatora

- Stymuluje pracę przyczepów mięśniowych w obszarze skrzydełek nosa.
- Zmniejsza opór przepływu powietrza w przewodach nosowych, co umożliwia swobodniejsze oddychanie.
- Przekształca chrząstkę nosową, harmonizując kształt piramidy nosa.

Stymulator jest dostępny w 7 rozmiarach, 2 przeznaczonych dla dzieci powyżej 5. roku życia i 5 dla dorosłych.

Stymulator należy nosić nocą podczas snu. Przed założeniem pacjent powinien wprowadzić do nozdrzy warstwę wazeliny, aby ułatwić wprowadzenie tub do środka. Odpowiedni rozmiar stymulatora dobiera się na podstawie pomiaru średnicy nozdrzy – średnica tuby przewodzącej musi być z nią równa. W razie wątpliwości należy wybrać mniejszy rozmiar.

Rozmiary:

dzieci:

T00 - 8,81 mm

T0 - 9,51 mm

dorośli:

T1 - 11,02 mm

T2 - 12,02 mm

T3 - 13,03 mm

T4 - 14,03 mm

T5 - 15,03 mm

Po kilku miesiącach stosowania należy wymienić stymulator na większy o 1 rozmiar. Terapię należy kontynuować do momentu, w którym pacjent będzie mógł swobodnie stosować największy rozmiar stymulatora.

Stymulator należy trzymać z dala od źródeł ciepła - wysoka temperatura może wpłynąć na jego kształt, strukturę i elastyczność.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

STYMULATOR ODDYCHANIA ROZMIARY: T00 - 8,81 mm , T0 - 9,51 mm , T1 - 11,02 mm , T2 - 12,02 mm , T3 - 13,03 mm , T4 - 14,03 mm , T5 - 15,03 mm