

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/thymodentin-tymczasowe-wypełnianie-ubytkow-w-zebach-o-okresie-leczenia-chema-p-355.html>



Thymodentin tymczasowe wypełnianie ubytków w zębach o okresie leczenia - Chema

Cena brutto	25,50 zł
Cena netto	23,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Chema

Opis produktu

Thymodentin wypełnienie czasowe 100 g

Wyrób do tymczasowego wypełniania ubytków w zębach w okresie leczenia. Przeznaczony do wypełniania ubytków próchnicowych, jako samodzielny opatrunek (przy powierzchniowych ubytkach), lub jako pokrycie wkładek stosowanych w leczeniu próchnicy zębów.

Wyrób w postaci proszku. Po zmieszaniu z wodą w odpowiednich proporcjach, materiał twardnieje (reakcja siarczanu i tlenku cynku oraz siarczanu wapnia z wodą) tworząc jednorodną stałą masę.

Sposób użycia:

- Wyrób rozrobić z wodą oczyszczoną na płytce szklanej do konsystencji niezbyt gęstej pasty; **wprowadzając zawsze proszek do wody**. Zalecana temperatura otoczenia podczas pracy z wyrobem: $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$. Zalecane proporcje: 2,8 g proszku : 1 ml wody oczyszczonej. Czas mieszania: do 60 s.
- Przygotowaną pastę wprowadzić w ciągu kolejnych 30 s do wcześniej opracowanego i oczyszczonego ubytku, w którym bez dostępu śliny materiał twardnieje. Czas wiązania, mierzony od początku mieszania wynosi 2 – 4,5 min. Grubość warstwy wypełnienia nie powinna być mniejsza niż 3 – 4 mm.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w suchym miejscu, w dokładnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C .

Opakowanie:

Opakowanie bezpośrednie: pojemnik z tworzywa sztucznego zamknięty wieczkiem, zawierający 100 g wyrobu.

Skład:

gips modelowy, siarczan cynku, dekstryna żółta, kaolin, tlenek cynku, konserwant (tymol 0,10%)