

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/velox-top-af-1-litr-neutral-dezynfekcja-powierzchni-p-1472.html>

# Velox TOP AF 1 Litr Neutral - dezynfekcja powierzchni

Cena	<b>19,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>

## Opis produktu

### Cechy produktu:

- Działa już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Rota
- Zalecany do aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, unitów, blatów, szafek pacjenta, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów, wycisków silikonowych, tyłek protetycznych, protez i wycisków
- Przeznaczony do wszelkich powierzchni pozamedycznych np. w gastronomii, fryzjerstwie oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obciowe – opinia Famed
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy
- Gwarancja skuteczności
- Wysoka redukcja ryzyka zakażenia
- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni
- Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów
- Daje efekt odświeżenia
- Ekonomiczny w użyciu

**Sposób użycia:** Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie (można przetrzeć jednorazowym ręcznikiem). W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą. Produkt wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

### Skład: 100 g zawiera:

40g – propan-2-ol (CAS:67-63-0)  
20g – etanol  
0,39g – aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym  
0,25g – chlorek didecyldimetyloamoniowy

### Opakowanie:

butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

**Zastosowanie:** Velox® Top AF to alkoholowy płyn do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni (fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna oraz końcówki stomatologiczne przed procesem sterylizacji). Przeznaczony również do stosowania w gastronomii, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Idealnie nadaje się do mycia i dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze. Działa na wirusy Rota i Adeno.

### ZAPACHY:

Grejpfrut  
Neutral

### Spektrum

**Bakterie** (w tym MRSA)

**Grzyby** (C. albicans)

### Normy wg EN 14885

EN 1276  
EN 13697  
EN 13727  
EN 1650  
EN 13624

### Obciążenie organiczne

niskie	wysokie
30 sek.	60 sek.
30 sek.	60 sek.
30 sek.	
30 sek.	60 sek.
30 sek.	

---

<b>Prątki gruźlicy</b> (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	60 sek.
<b>Wirus otoczkowe</b> (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, wirus grypy A, B, C, Herpes simplex)	DVV/RKI	30 sek.	30 sek.
<b>Wirus Rota</b>	EN 14476	30 sek.	
<b>Wirus Adeno</b>	EN 14476	60 sek.	